

- Répond aux exigences minimales de la directive AFNOR SPEC S76-001  
- Répond au Cahier des Charges Techniques IFTH version 2.0 du 30/04/2020  
- Validé DGA rapport RP/20-2808/DGA Filtration & 10 lavages



## Description

Masque 2 plis catégorie 1 lavable, 2 couches polyester/coton M4131, 240gr/m<sup>2</sup>, élastique de 15cm de longueur et 0.5cm de largeur, surjeté sur tout le pourtour.

## Conditionnement

Paquet de 10 pièces.

## Avantages

- Confortable, ce masque s'adapte à toutes les morphologies.
- Masque & matériaux de fabrication française
- Les couches polyester/coton sont :




## Pictogramme & niveau de performance

Répond aux exigences minimales de la directive AFNOR SPEC S76-001  
Répond au Cahier des Charges Techniques IFTH version 2.0 du 30/04/2020

Validé DGA rapport RP/20-2808/DGA Filtration & 10 lavages

## Dimensions

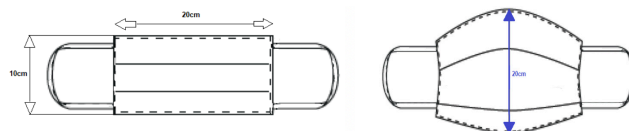

## Instruction de mise en place

Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 11 fois.

- Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon et se désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur son visage.
- Lorsque l'on porte le masque : éviter de le toucher et de le déplacer.
- Chaque fois que l'on touche un masque, se laver les mains à l'eau et au savon et se désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.
- Si besoin de boire, de manger : changer de masque.
- Lorsque le masque s'humidifie : le remplacer par un nouveau masque.

### Pour retirer le masque:

- L'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque)
- Se laver les mains avec de l'eau et au savon et se désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.

## Préconisations

Ce masque est une protection supplémentaire qui doit être utilisée dans le respect strict des recommandations en termes de gestes barrières, de distanciation sociale et dans le cadre des mesures de confinement prises dans le contexte de l'épidémie COVID-19.  
Selon les exigences AFNOR, le temps de port est limité à 4 heures.

## Nuisances & allergies:

Les matériaux utilisés pour confectionner ce vêtement, ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances au porteur, et, ont été choisis aussi confortable que possible. Pas de cas d'allergies porté à notre connaissance.

## Stockage:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec et propre à l'abri de l'humidité.

## Entretien:

Lavage en machine à 60°C

Secher à l'air libre

Repasser à température basse 120°C maximum